

ПАСПОРТ

ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

СТУЛ МЕДИЦИНСКИЙ СМК- «МСК»: МСК-236 из набора мебели медицинской
ТУ 9452-037-52962725-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Стул медицинский(далее по тексту - стул) предназначен для сидения, устанавливается в больницах, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях.
1.2. Стул изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры.
2.1.2. Основные параметры и размеры стула указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Table with 2 columns: Наименование параметров, Значение параметров СМК- «МСК»(МСК-236). Rows include dimensions (width, depth, height, seat height) and weight.

2.2. Характеристики (свойства):

- 2.2.1. Стул выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не менее 120 кг.
2.2.2. Каркас стула имеет защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛИАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
2.2.3. Поверхность стула устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки изделия:

Table with 3 columns: №, Наименование изделия, Кол-во шт. Rows list components like seat, frame, caps, wedges, screws, and passport.



4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


- 4.1. Стул состоит из каркаса и сидения.
4.2. Каркас стула изготовлен из стальных труб.
4.3. Сидение изготовлено из полиэтилена.
4.4. Каркас и сидение собраны между собой при помощи стандартных крепежных изделий.
4.5. Каркас имеет пластиковые заглушки.

5. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 5.1. После транспортирования стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
5.2. Распаковать стул и проверить целостность покрытия.
5.3. Проверить комплектность.
5.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

6. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 6.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 5 настоящего паспорта.
6.2. Закрепить сидение на каркас при помощи клиньев и винтов М6.
6.3. Установить заглушки в основание каркаса.

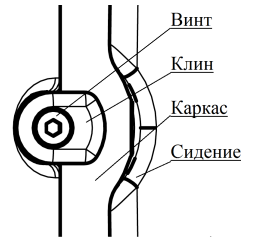

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1. Стул не требует специального обслуживания.
7.2. Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 8.1. Стул в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С без конденсации влаги.
8.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тумб требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.
9.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
9.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
9.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стул медицинский СМК- «МСК»: МСК-236 из набора мебели медицинской
Дата выпуска
Соответствует ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации. М. П.

11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Blank form for warranty card with fields for item name, number, date of issue, and acquisition date.

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00