

ПАСПОРТ

ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СиМК- «МСК»
(МСК-5473.120.02, МСК-5478.120.02)
ТУ 9452-037-52962725-2017

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Столы медицинские инструментальные(далее по тексту — столы) предназначены для использования в больницах, в санаториях, гостиницах, в бытовых условиях.
1.2. Столы изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10° С до +35° С и относительной влажности 80% при температуре +25° С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные параметры и размеры столов указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Table with 3 columns: Обозначение, Габаритные размеры:ШхГ хВ, ±5 мм, Масса, не более, кг. Rows include МСК-5473.120.02 and МСК-5478.120.02.

- 2.2. Стол выдерживает равномерно распределенную нагрузку на столешницу не более 100кг.
2.3. Стол имеет 4 колеса, диаметром не менее 100 мм
2.4. Усилие, необходимое для перемещения стола с номинальной нагрузкой не более 50 Н (5 кг), при этом колеса должны быть сориентированы в направлении движения.
2.5. Поверхность столов устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.
2.6. Средний срок службы столов до списания не менее 8 лет.
За критерий предельного состояния столов принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Комплект поставки столов указан в таблице 2.

Таблица 2.

Table with 2 columns: Наименование комплектующего, Кол-во, шт. Lists components like Боковина, Столешница, Стяжка, Колесо, Винт, Шайба, Болт, Шайба, Ключ.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Все модели столов изготавливаются из нержавеющей стальной трубы квадратного сечения на основе единой базовой конструкции и состоят из следующих узлов: боковин, столешницы, стяжки. Столешница изготавливается из нержавеющей стали.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К эксплуатации столов допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и правила эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1. После транспортирования столов в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2-х часов.

- 6.2. Распаковать стол. Проверить комплектность.
6.3. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
7.2 Прикрепить боковины к столешнице винтами М10х25 с шайбами 10.
7.3 Прикрепить стяжку к боковинам болтами М10х45, шайбами 10.
7.4 Прикрепить колеса к боковинам винтами М10х25 с шайбами 10. В случае затруднения установки винтов в колеса необходимо открутить ось вращения ролика колеса и удалить его. После крепления вилки колеса установить ролик в обратном порядке.

- 7.5 Перед началом эксплуатации проверить надежность крепления всех узлов стола, установить стол на место.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 8.1 Столы имеют простую надежную конструкцию и не требуют специального технического обслуживания.
8.2 Периодический осмотр включает в себя осмотр узлов крепления.
В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты гаечным ключом.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 9.1 Столы в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 100% при температуре +25°С.
9.2 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте.
10.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.
10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантийного талона.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол медицинский инструментальный СиМК- «МСК» _____

Дата выпуска _____

Соответствует техническим условиям ТУ 9452-037-52962725-2017 и признан годным к эксплуатации. _____ М.П.

Подпись лиц, ответственных за приемку. _____

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие _____ на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

_____ наименование и тип изделия

_____ номер ГОСТ или ТУ

Дата выпуска _____

Приобретен _____ дата, подпись, штамп торгующей организации



Производитель: ООО «Медстальконструкция»
Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00